

Marathon / Escort håndstykke. Håndstykket påmonteres omnicut skærer. Denne vejledning er tillæg til vedlagt manual / Illustration.

2. Skift af fræserbor

Drej på håndstykket for at løsne/sætte fræserboret fast

3. Smøring af håndstykket

Anvend KAVO eller PANA spray(se illustration i vedlagte tegning punkt 3)

Sæt sprayenheden fast på kavo dåsen. Ryst dåsen 3-4 gange. Indsæt sprayenheden i enden af håndstykket (skal skilles fra det nederste stykke først). Spray 2-3 sekunder indtil der kommer olie ud af håndstykket.

NB: For bedste behandling af håndstykket og for at holdbarheden er længst mulig, anbefales at smøre en gang ugentlig og lade håndstykket stå i et bæger med spidsen nedad, weekenden over. Evt. med noget papir i bunden, til at suge det overskydende olie.

NB: Hold godt fast på håndstykket, så det ikke glider under olieringsprocessen. Hold spraydåsen lodret mens der sprayer.

4. Rengøring og sterilisation

Håndstykket kan rengøres i en desinfektions wibe som er alkoholbaseret, så der ikke er overskydende fugt. Rengør aldrig håndstykket i kogende vand, i kemikalier eller i ultralydsrensere. Håndstykket kan steriliseres ved damp sterilisation.