

PODOSTRIPE manual:

Anvendelsesområder

Med denne nye stag kan alle patienter - inklusive risikopatienter og børn - med indgroede, indviklede og deformerede negle hjælpes hurtigt og uden problemer. Det giver øjeblikkelig smertelindring og en varig behandlingssucces. Og applikationen er så let som at tape på en gips.

Da PODOSTRIPE-materialet er blødt, kan stangen let påføres på indviklede negle. Kanter og stærkt buede negle er ikke længere en hindring for klæbemethoden.

Fordele for terapeuter:

- Nem håndtering
- Velegnet til diabetikere / risikopatienter / børn
- Hurtig behandling (mulig ved regelmæssig fodpleje)
- Blødt materiale er velegnet til alle negleformer - også til rullede eller vinklede negle
- Fås i tre størrelser
- Kundeloyalitet takket være regelmæssige aftaler

PODOSTRIPE-selen fastgøres til neglen og aktiveres i to lette trin. Som et anstrengt gummibånd skaber det en kraft, der let hæver neglens kanter og aflaster patienten meget hurtigt fra hans smerter. Den strækformede stag bevarer sin klemkraft og forbliver aktiv, indtil den fjernes eller udskiftes (hver 3-6 uge).

Trin 1

Den ene ende af staget er fastgjort til neglen.

Trin 2

Stangen strækkes derefter, og den anden ende limes på neglen, mens den er under spænding.

Trin 3

Materialets spænding får neglekanterne til at løfte lidt op.

Trin 4

Fanen fjernes derefter.